

AMONYAK ETANOL BİKARBONAT KALİBRATÖR SET

Tr

REF:ZA92	Amonyak/Etanol/Bikarbonat Kalibratör Set	2 x 1.5 mL +
REF:ZA93	Amonyak/Etanol/Bikarbonat Kalibratör Set	2 x 1.5 mL 5 x 1.5 mL

Kullanma talimatı içerisinde yapılan değişiklikler gri ile işaretlenmiştir.

Prospektüsteki talimatlar dikkatle takip edilmelidir. Talimatlarda herhangi bir sapma olursa tahlil sonuçlarının güvenilirliği garanti edilemez.

KULLANIM AMACI

Amonyak/Etanol/Bikarbonat Kalibratör Set, Amonyak, Etanol ve Bikarbonat testlerinin kalibrasyonu içindir.

İÇİNDEKİLER / SAĞLANAN MALZEMELER

Amonyak/Etanol/Bikarbonat Kalibratör Set

REF: ZA92

Ambalaj: 2 x 1.5 + 2 x 1.5 mL Likit

Amonyak/Etanol/Bikarbonat Kalibratör Set

REF: ZA93

Ambalaj: 5 x 1.5 Likit

Beraber Kullanılmak Üzere;

Archem Amonyak Reaktif

Archem Etanol Reaktif

Archem Bikarbonat Reaktif

Amonyak/Etanol/Bikarbonat Kontrol Set

STANDARDİZASYON

Etanol standardı FS değerleri, bir NIST SRM 2893 nitelikli Headspace gaz kromatografisi / alev iyonizasyon detektörü (GC/FID) kullanılarak elde edilmiştir.

***Amonyak ve Bikarbonat için henüz çalışmalar tamamlanmamıştır.*

KALİBRATÖR STABİLİTESİ

Sıcaklık-Şartlar	Stabilite Süresi
Açılmamış, etiket üzerinde belirtilen sıcaklık şartlarında	Şişenin üzerindeki son kullanma tarihine kadar
Açılmış ve +2/+8°C'de	21gün

KALİBRATÖRÜN HAZIRLANMASI

Kalibratör kullanım için hazırdır.

KARARSIZLIK VE BOZULMA BELİRTİLERİ

Aşırı bulanıklık ve mikrobiyal büyüme varlığı ve bozulma belirtisi olabilir.

ÖNLEMLER



İnsan kaynaklı materyal. Potansiyel bulaşıcı gibi davranınız. Bu ürünün hazırlanmasında kullanılan her plazma donör FDA onaylı bir yöntemle test edilmiştir ve HIV 1/2 HBsAg, HCV, HIV-Ag antikor varlığı için negatif bulunmuştur. Ancak bilinen test yöntemlerinin hiçbirisi hepatit B virüsü, Human Immunodeficiency Virus (HIV) veya enfeksiyöz ajanlar bulunmadığına tam güvence sunamaz. Tüm insan kaynaklı ürünler uygun önlemler alınarak İyi Laboratuvar Uygulamaları (Good Laboratory Practice - GLP) ilkelerine uygun şekilde kullanılmalıdır. Güvenlik Bilgi Formuna www.archem.com.tr'den ulaşabilirsiniz veya yerel temsilcinize başvurabilirsiniz.

UYARILAR

IVD: In Vitro Diagnostik kullanım içindir.

Son kullanma tarihi geçmiş reaktifleri kullanmayınız.

Farklı iki lot numaralı reaktif birbirine karıştırılmamalıdır.

Profesyonel kullanım içindir.

İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) ilkelerine uyunuz.

DİKKAT: Bu ürün ile birlikte insan kaynaklı örnekler işleme alınmaktadır. İnsan kaynaklı örneklerin tümü potansiyel bulaşıcı olarak kabul edilir ve OHSAS standartlarına uygun olarak ele alınması tavsiye edilmektedir.

Tehlike

H317

:Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir.

Önlem

AMONYAK ETANOL BİKARBONAT KALİBRATÖR SET

Tr

- P280 :Koruyucu eldiven / koruyucu giysi / gözlük / maske kullanınız.
- P264 :Kullandıktan sonra elinizi uygun şekilde yıkayınız.
- P272 :Kirlenmiş iş kıyafetinin iş yeri dışında kullanımına izin verilmemelidir.

Müdahale

- P302+P352 :Deri ile temasta bol sabun ve su ile yıkayınız.
- P333+P313 :Deriyi tahriş eder ya da kızarıklık meydana gelirse tıbbi yardıma başvurunuz.
- P362+P364 :Kontamine olmuş giysiyi çıkarınız ve kullanmadan önce uygun şekilde yıkayınız.

İmha

- P501 :İçerikleri ve kapları yerel düzenlemelere göre atınız.

REFERANSLAR

1. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, editors. Tiets Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed. St. Louis, MO, Elsevier Saunders; 2006:2263.
2. S.Dean Allison, Mark C.Manning, Theodore W.Randolph, Kim Middleton, Ashley Davis, John F.Carpenter. Optimization Of Storage Of Lyophilized Actin Using Combinations Of Disaccharides And Dextran. Journal Of Pharmaceutical Sciences.89/2,199- 214(2000)

MARKA

Archem Amonyak/Etanol/Bikarbonat Kalibratör Set çeşitli yetki alanlarında Archem Sağlık Sanayi ve Tic. A.Ş. ticari markasıdır.



Archem Sağlık Sanayi ve Tic. A.Ş.
Mahmutbey Mah. Halkalı Cad. No:124 Kat:4
Bağcılar/İstanbul/Türkiye
Tlf: + 90 212 444 08 92
Fax: +90 212 629 98 89
info@archem.com.tr www.archem.com.tr



SEMBOLLER

IVD

In Vitro Diagnostik Medikal Cihaz

LOT

Lot Numarası

CAL

Kalibratör

GTIN

Küresel Ticari Ürün Numarası

REF

Referans Numarası

FOR USE WITH

Birlikte Kullanılacak Ürünleri Tanımlar

PRODUCT OF TURKEY

Türkiye Ürünü



Üretici



Son Kullanma Tarihi



Sıcaklık Sınırlaması (Saklama Şartları)



Kullanım Kılavuzuna Bakınız



Dikkat



Test Sayısı